

### العدة الخاصة بـ "فحص التشخيص"

- دليل المستخدم هذا
- أنبوب مسطح لأخذ عينة
  - ورقة لجمع البراز • كيس بلاستيكي
  - ظرف لإرسال الاختبار

- من الضروري ذكر التاريخ الذي قمت فيه بالفحص وإلا لا يمكن تفسير النتائج
  - من الضروري أيضاً إرسال الفحص خلال ٢٤ ساعة من إجراءه وتفادي ارساله قبل حلول أيام الاجازات
  - النساء اللواتي لم تبلغن سن اليأس: يجب أن يجرى الفحص خارج أوقات الدورة الشهرية، الْأُمثل هو القيام به يومين أو ثلاثة أيام بعد انتهاء

تأكدوا من صحة هذه المعلومات

أدرج تاريخ إجراء الفحص

انزع اللاصق من الأنبوب المسطح وألصقه على بطاقة المتابعة

اكتب التاريخ ووقع على ورقة المعلومات وعلى ترخيص معالجة المعلومات

## المرحلة الأولى في التشخيص الخاص بك: استلمت بطاقة متابعة يجب أن تلحقها بالفحص



#### بتوقیعی:

- أعلن أنه تم إخباري عن كيفية تنظيم عملية القيام بتشخيص سرطان الكولون، محاسنه
- أُسمَح بنقل واستخدام وحفظ معلوماتي الطبية من قبل العاملين على ملفي في قطاع الصحة ضمن إطار برناُمج التشخيُص سواء تم ذلك عن طريق البريد العادي أو عن طريق البريد الإلكتروني وذلك حسب المتطلبات القانونية المطبقة فيما يخص حماية البيانات
  - أسمح بإَّرسال معلوماتي الطبية بسرية وبما يوافق السرية الطبية لسجلات السرطان في
    - أوافق أن تستخدم معلوماتي المحاطة بالسرية في الإحصائيات وفي تحسين جودة
    - أسمّح في حال تبديل مكان إقامتي بإرسال ملفي بالكامل إلى مركز التشخيص (إن تواجد) في الكانتون الذي انتقلت إليه
- أسمح بإَّرسال نتاَّئج القَّحوصات التكميلية التابعة لفحص التشخيص إلى مركز التشخيص - ستظل هذه المعلومات سرية. يمكنك في أي وقت سحب موافقتك سواء عن طريق رسالة
  - خطبة أو تعديل المعلومات خاصة بك
- أوافق أن تسجل بطاقة المتابعة هذه المكتملة البيانات والموقعة من قبلي بشكل إلكتروني وأن تتلف النسخة الورقية

التاريخ:

لمزيد من المعلومات أو لتوجيهات مفصلة أكثر، الرجاء منك الاتصال بصيدليتك أو طبيبك أو الاتصال بجمعية تشخيص السرطان بيجون في ديليمون \_ 032 422 58



# المرحلة الثانية للتشخيص الخاص بك

سجل اسمك واسم العائلة وتاريخ ميلادك

على لاصقة الأنبوب المسطح أو الصق

اللاصقة في حال استلمت رسالة دعوة

بواسطة ساِق تجميع العينة خذ البراز

افتح بهدوء غطاء الأنبوب الفيروزي لتظهر

قِم بالتبرز (يجب أن لا يلمس البراز البول

أو ماء الحمام) لك ساق تجميع العينة



أرسل الأنبوب وبطاقة الاختبار لمختبر التحاليل خلال الـ ٢٤ ساعة. الارسال السريع يضمن لك جودة التحليل.




خض أنبوب أخذ العينة المغلق بقوة. ضع الأنبوب في الكيس البلاستيكي وضعه في ظرف الإرسال.



تبول إن كانت لديك حاجة لذلك ثم ضع

ورقة تجميع البراز على مقعد الحمام كما

هو موضح في الرسم

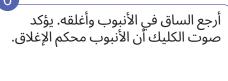



من ٥ أو ٦ أماكن مختلفة. يجب أن تملأ كامل الأخاديد بالبراز





ستحصل على النتائج خلال مدة ثمانية أيام مفتوحة